

Tjekliste

Måltagningskema for SIGVARIS Kompressionsstrømpe, ankeltryk 34-46 mm Hg (Begge ben måles)

Venstre

Højre

Omkredsmål

- cm

x-small*

503 serien

small

small
PLUS

medium

medium
PLUS

large

large
PLUS

X-
large

X-large

PLUS

cD

26-32

28-34

32-38

31-37

36-42

34-40

40-46

38-43

44-49

cB

17-19

19-23

19-23

23-26

23-26

26-29

26-29

29-32

29-32

Længdemål


AD

Kort

33-37

Lang

38-44

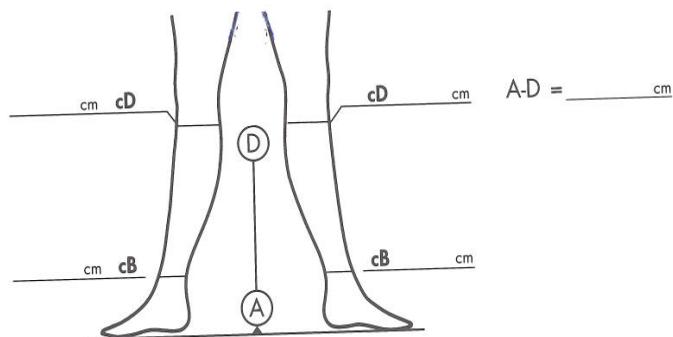

SIGVARIS Kompressionsstrømper - 504 serien ► Der anvendes Strømpestørrelse svarende til mål taget på det "raske" ben.

Den valgte strømpestørrelse markeres med en cirkel ex. :

small

* x-small findes ikke i 504 serien, hvorfor x-small i 503 serien anvendes, velvidende Ankeltrykket ikke lever op til anbefalingerne i den kliniske retningslinje

¹ Kompressionsbehandling – Gode råd ved brug af kompressionsstrømper. Mediq Danmark. Februar 2010

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

- CLEARINGHOUSE

Side 1

www.cfkr.dk

kontakt@cfkr.dk

Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,
Aalborg Universitet
Frederik Bajers Vej 7 E4
DK-9220 Aalborg

